

Инвалидное кресло-коляска

ПАСПОРТ

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS901-41(46)



Основные технические характеристики:

Ширина сидения, мм	410 (460)
Ширина в рабочем состоянии, мм	600 (650)
Диаметр заднего колеса, мм	610
Диаметр переднего колеса, мм	200
Высота сидения, мм	500
Высота от пола до спинки, мм	900
Грузоподъёмность, кг	100
Масса, кг	19

Комплект поставки

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из стали с хромовым или полимерным покрытием. Обе модели оснащены съёмными подлокотниками. Ширина сидения 41, 46 см, в зависимости от выбранной модели.

Меры безопасности

- при посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из неё колеса должны быть поставлены на тормоза
- категорически запрещается вставать на подножки
- запрещена эксплуатация изделия с неисправными тормозами

Внимание! Перед эксплуатацией кресла-коляски необходимо проверить надёжность крепления деталей.

Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

Складывание и раскладывание

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Для того чтобы разложить кресло-коляску необходимо раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания. Для складывания необходимо потянуть за две ручки расположенные с боков сидения, и поднять вверх.

Опоры для ног

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора. Модели комплектуются съёмными подножками.

Тормоза

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса

Некоторые модели снабжены пневматическими задними колесами, поэтому необходимо следить за давлением в шинах.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определённого технического ухода. Обивку из искусственной кожи необходимо чистить тёплой водой с применением мягких моющих средств.

При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твёрдыми и острыми предметами.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.АГ98.Д27948,
срок действия с 10.06.2014 до 09.06.2017г.

Регистрационное удостоверение №2009/05010 от 27.08.2009г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: **(495) 968-80-83, (916) 503-12-29**

Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

www.mega-optim.ru