

## Сведения о сертификации

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS966LH, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/06754  
действительно от 28.04.2011 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,**  
**«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай,**  
**5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City,**  
**China**

**Дистрибьютор: ТМ «Армед»**  
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11  
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02  
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS966LH –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.  
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

### Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

**Сайт: [www.armed.ru](http://www.armed.ru)**

## *Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации*

### Средство реабилитации инвалидов:

### Ходунки «Armed» FS966LH



Ходунки «Armed» FS966LH - приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилым людям в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

**Ходунки «Armed» FS966LH** предназначены для облегчения передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы.

- Рама алюминиевая имеет высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
- Ходунки оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.
- Рукоятки регулируются по высоте, обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими торможение при движении.
- Колеса литые, передние - самоориентирующиеся, задние - фиксированные.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

#### Последовательность использования


1. Раздвиньте раму, как показано на рисунке 1; поместите багажную корзину под сиденье; установите спинку сиденья как показано на рисунке 1 установите ручки в раму и затяните болты.
2. Проверьте ходовые качества роллатора и тормоза, отрегулируйте высоту ручек.

#### Меры безопасности и обслуживания

1. Убедитесь, что все болты хорошо затянуты
2. Устройство рассчитано на пользователей, чей вес не превышает 110 кг.
3. Содержите устройство в чистоте, раз в 6 месяцев обрабатывайте смазочным материалом.

#### Технические характеристики:

1. Регулировка высоты рукояток через 2,5 см, 5 уровней .
2. Максимальная нагрузка – 110 кг
3. Расстояние между передними и задними колесами - 49 см
4. Ширина – 58 см
5. Высота – 79 - 92 см
6. Вес – 6,8 кг

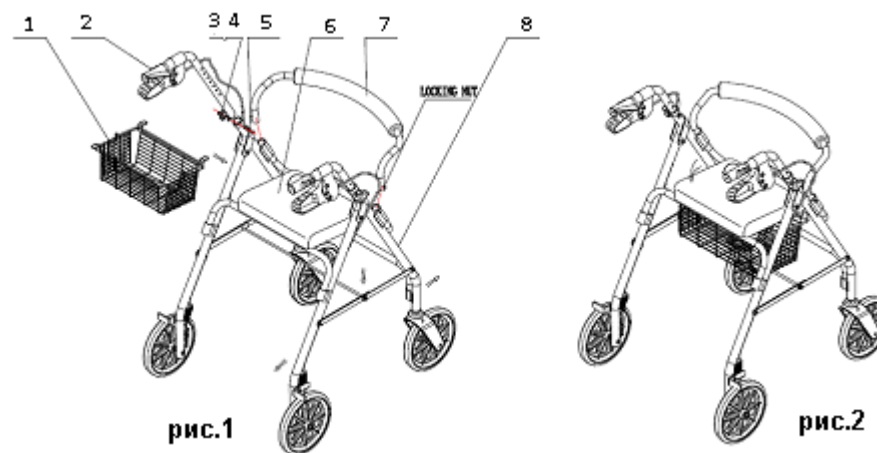

Комплектация ходунков-роллаторов FS966LH «Armed» (Рис. 1)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТХ	Кол-во
1	БАГАЖНАЯ КОРЗИНА		1
2	РУЧКИ		2 (каждой)
3	ШАЙБА		2
4	ГАЙКА	М6	2
5	БОЛТ	М6Х30	2
6	СИДЕНЬЕ		1
7	СПИНКА		1
8	РАМА		1