

**Матрас противопролежневый Armed ячеистый**  
**Матрас противопролежневый Armed трубчатый**



**ПАСПОРТ**

Мы благодарны Вам за использование **матраса противопрележного Armed** - матрас с компрессором (ромбовидные ячейки, трубы).

Прежде, чем использовать матрас противопрележный Armed, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Примечание:** пожалуйста, имейте в виду, что применение данного противопрележного матраса должно полностью соответствовать этой инструкции, иначе продукт может быть поврежден. Пожалуйста, проводите дезинфекцию, руководствуясь этой инструкцией.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Прележни являются серьезной проблемой для прикованных к постели пациентов, особенно для тех, кто не может поворачиваться. Из-за долгого контакта с поверхностью кровати, кожа начинает воспаляться и этот процесс развивается. Язва причиняет серьезную боль пациенту помимо основного заболевания, таким образом, уход за пациентом становится намного тяжелее. Стандартный противопрележный матрас несет в себе предохранительную функцию, а не восстановительную. Их основная цель – уменьшить давление тела на кровать, а не лечить прележни.

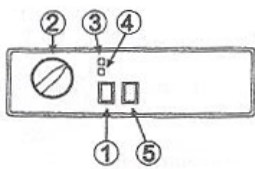
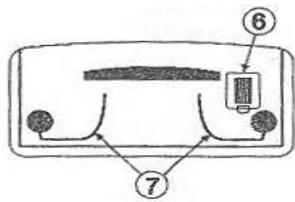
Противопрележная система – матрас с компрессором (ромбовидные ячейки или трубы) состоит из воздушных подушек. Они поочередно накачиваются, образуя 2 группы А и В, и, соответственно, меняют точки давления тела.

## 2. СТРУКТУРА И ПАРАМЕТРЫ

### Комплектность:

Наименование	Кол.
Матрас противопрележный	1
Трубка соединительная	2
Насос воздушный (компрессор)	1
Комплект ЗИП:	
Заплата ПВХ	2
Клей	1
Предохранитель	1
Паспорт	1

### Описание и технические характеристики: насос

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. кнопка включения</li> <li>2. регулятор давления</li> <li>3. индикатор нормального давления (зеленая лампочка)</li> <li>4. индикатор пониженного давления (желтая кнопка)</li> <li>5. кнопка статической функции</li> </ol>	<p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>Питание 230В, 50Гц</p> <p>Потребление Мощности: 13,5 Вт; Ток: 0,06 А</p> <p>Класс безопасности: Класс II</p> <p>Защита от электричества: Тип В</p> <p>Рабочее давление: 20 +/- 1 кПА</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. воздушный фильтр</li> <li>7. крючки для подвешивания</li> </ol>	<p>Длительность цикла 12 мин</p> <p>габариты 26x12x8 см</p> <p>масса 1.5 кг</p> <p>гарантийный срок 12 месяцев</p>

## Матрас:

Матрас	Клапан экстренного сброса воздуха	Бактериостатическое покрывало	Состав	Размер	Вес	Статическая функция	Макс. нагрузка	Пролежни (степень)
ячейки	-	-	ПВХ	1950x900x63	2,2	да	120	средняя
полосы	-	да	нейлон	1950x900x85	4,3	да	120	высокая

## 4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите насос на плоскую, жесткую поверхность или подвести на поручни ножного отдела кровати, используя крючки на корпусе насоса.
2. Противопрележневый матрас расстелите на матрас кровати, загнув свободные концы под него. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе кровати.
3. Подсоедините насос к матрасу с помощью соединительных трубок.
4. Убедитесь, что трубки не закручены и не проходят под матрасом.
5. Включите насос (положение «ВКЛ»). Воздух начнет поступать в матрас.
6. Застелите матрас хлопковой простыней и уложите пациента.
7. Отрегулируйте давление, выбрав соответственно «MIN» или «MAX» в зависимости от веса пациента и комфортности. Оптимальный вариант когда между телом пациента и ненадутой частью матраса проходят два пальца руки.
8. Для включения статической функции установите кнопку 5 в положение «ВКЛ», при этом все ячейки надуются одновременно, обеспечивая статическую поверхность матраса. Это позволяет с легкостью менять положение пациента при проведении процедур или кормления.
9. При выключении статической функции система работает в обычном режиме.

**ВНИМАНИЕ:** РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ.

## 5. ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Типы поломок		Проблемы	Методы починки
Матрац не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка	Присоединить ее
	Индикатор выключен	Матрац проколот	Заклейте дыру
Матрац надувается не полностью	Матрац очень мягкий	Не подключено питание	Подключите питание
		Давление минимально	Поверните диск направо
		Матрац трещит	Разверните его и вымойте
	Воздушный фильтр заблокирован из-за долгого использования	Продуйте его	
Насос шумит	Винты на воздушном насосе не затянуты	Затяните их	

## 6. УХОД ЗА СИСТЕМОЙ

### Насос.

Проверяйте воздушный фильтр 1 раз в месяц. В случае загрязнения помойте фильтр мягким моющим средством, высушите и установите на место.

Корпус насоса протирайте тканью, смоченной 25% раствором нашатырного спирта.

### Матрас.

Во избежание проколов избегайте контактов матраса с колюще-режущими предметами. Гигиеническую обработку производить мыльным или дезинфицирующими растворами. Сушить в месте, защищенном от солнца.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Температура: от – 40С до + 55С

Влажность: 10% – 93%

Среда: 860hpa – 1060hpa

В хорошо вентилируемом помещении.

При транспортировке будьте осторожны: избегайте влажности и тряски.

### ***Сведения о сертификации***

Матрасы противопролежневые Armed ячеистый и Armed трубчатый соответствуют техническим условиям и признаны годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/07068 действительно от 09.06.2010 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,  
«Джиангсу Дэnguан Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд.», Китай,  
213200, Jiangsu Province, Jintan City, Danfeng West Road, №17**

**Дистрибьютор:** ТМ «Армед»

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на матрасы противопролежневые Armed ячеистый и трубчатый –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

**Телефоны сервисных центров:**

**г. Москва: (495) 411-08-11**

**г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02**

**г. Екатеринбург: (343) 357-33-61**

**Сайт: [www.armed.ru](http://www.armed.ru)**