



Поручни для ванны  
Руководство по эксплуатации

Модели:

10400; 10401; 10402; 10403; 10404; 10405.



## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик поручней для ванны моделей 10400; 10401; 10402; 10403; 10404; 10405.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Поручни для ванны являются страховочным элементом при перемещении людей с нарушенной координацией движений.

### 1.2 Технические характеристики

#### **Модель 10400.**

- Поручень для ванн с универсальным креплением.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик.
- Двойная эргономичная ручка.
- Крепление на стенку ванны при помощи зажимов-фиксаторов.
- Регулируемая ширина крепления для различной ширины ванн 9 - 16,5 см.
- Регулировка ширины крепления с помощью барашкового зажима.
- Противоскользящее покрытие на внутренних стенках зажимов фиксаторов.
- Размер поручня: 31 x 17 см.
- Вес: 1,8 кг.
- Максимальная нагрузка: 100 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

## **Модель 10401; 10402; 10403; 10404; 10405.**

- Поручень настенный для ванн.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик.
- Крепление с помощью 3-х шурупов с каждой стороны.
- Крепёжная часть диаметром 85 мм.
- Декоративная накладка на крепёжную часть.
- Диаметр трубки: 3,2 см.
- Расстояние от трубки до стены: 5 см.
- Длина: 10401 - 31 см; 10402 - 4 см; 10403 - 48 см; 10404 - 61 см; 10405 - 81 см.
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

### **1.3 Упаковка**

В комплект к моделям

-10400 входит поручень для ванны.

- 10401; 10402; 10403; 10404; 10405 входят декоративная панель на крепления; шурупы.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Все актуальные изменения можно найти на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

## **2. использование по назначению**

### **2.1 Важные предупреждения:**

- Протрите изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

2.2 Порядок работы. Перед использованием проверьте части ходунка на наличие дефектов и повреждений.

Модель 10400: установите поручень для ванны на борт ванны и зафиксируйте, закрутив барашковый фиксатор.

Модель 10401; 10402; 10403; 10404; 10405: просверлите дырки в стене, закрепите шурупами. Убедитесь, что используете дюбели.

### 3. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6  
Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати,  
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Поручни для ванны, модели 10400; 10401; 10402; 10403; 10404;  
10405.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Приложение 1

1

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

**Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве**

**Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012**

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

**ИНН 7734197385**

**125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6**

**тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru**

(адрес, телефон, факс)

в лице

**Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели**

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

### Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами:

- заявляет, что
1. Сиденья для ванн: АРТ. 10410N, АРТ. 10440, АРТ. 10440С
  2. Стулья для ванн: АРТ. 10466, АРТ. 10502, АРТ. 10566, АРТ. 10566Т, АРТ. 10578
  3. Поручни для ванн: АРТ. 10400, АРТ. 10401, АРТ. 10402, АРТ. 10403, АРТ. 10404, АРТ. 10405

**Изготовитель продукции:** VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД),  
8TH FLOOR, No 149, SEC. 2, TA TUNG RD. 221, HSICHIN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (Китай)

ЗАВОДЫ:

- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (Китай)
- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (Китай)
- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (Китай)
- NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE, INC., №1096, FENG CHOU ROAD, SHI CHOU VILLAGE, SHENG KANG TOWNSHIP, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (ТАЙВАНЬ).

**Код ОК 005 (ОКП) 94 5100 Код ТН ВЭД СНГ 9401800009, 9403700009**

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

### Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

**ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011,**

соответствует требованиям **ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 51632-2000, ГОСТ Р 51261-99**

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

**протоколов испытаний: №№ 1764.014, 1765.014, 1766.014 от 21.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);**

**№ 1132/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)**

**регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09871 от 21.06.2011**

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

**09.06.2014**

Декларация о соответствии действительна до **08.06.2019**



**С.П.Бадалян**

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)**

**Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.**

**141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29**

**Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anoremc.ru**

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

**№ РОСС TW.МЕ77.Д00348 от 09.06.2014**

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



**Д.А.Дружинин**

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок