

Сведения о сертификации

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS912L, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/06754
действительно от 28.04.2011 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,
«Фошан Донгфэнг Медикал Мануфактори», (Лтд), Китай,
5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City,
China**

Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS912L –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02
г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru



Средство реабилитации инвалидов:

ходунки «Armed» FS912L



Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS912L улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

Ходунки изготовлены из алюминия, имеют мягкие накладки на поручни. Ходунки «Armed» FS912L легко складываются и очень удобны при хранении. Передние ножки снабжены колесами, задние - резиновыми наконечниками против скольжения.

Высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см. Отверстия для регулировки высоты находятся в нижней части передних и задних ножек.

Складывание и раскладывание производится при помощи надежного фиксатора, который расположен на верхней трубке, соединяющей боковые рамы.

Что бы сложить ходунки: нажмите на фиксатор и сдвиньте пластиковый замок, так чтобы фиксатор остался в нажатом положении, боковые рамы сложите внутрь.

При использовании ходунков следует помнить о том, что:

- для максимальной устойчивости ходунки нужно поднять и затем опустить на все четыре ножки;
- необходимо поддерживать правильную осанку и положение тела;
- не подходить слишком близко к передней перекладине, так как это может уменьшить опору и привести к падению назад.



Технические характеристики:

1. Облегченный корпус из алюминиевого сплава
2. Складные с одним замком
3. Передние ножки оснащены колесами
4. Регулировка высоты через 2,5 см (8 уровней изменения высоты)
5. Максимальная нагрузка – 100 кг
6. Глубина - 42 см
7. Ширина – 44 см
8. Высота – 80 - 97 см
9. Вес – 2,8 кг
10. Диаметр колес – 10 см